

TURBINE

SPORTS BREATHING TECHNOLOGY

サイズガイド

鼻は指紋と同じくらい個々により異なるので、自分自身に合ったTURBINEのサイズを選択するために以下のサイズガイドを参考にしてください。

このページを印刷し、サイズガイドの点線を注意深く切り、以下の手順に従って鼻のサイズを調整してください。

印刷するときは、ページサイズオプションの[実際のサイズ]を選択して、ガイドが確実に拡大縮小されて印刷されるようにします。

※一般的に、男性はMまたはL、女性はSまたはMのどちらかであるため、最初にMを切り取ることをお勧めします。



- 1** どのサイズから始めればよいかわからない場合は、Mサイズのガイドを切り取ります。次に、色の付いた面を向こう側に向けて、鼻の下にサイジングツールを配置します。



- 2** うまくフィットさせるには、黒い先端を鼻の折り目線に配置する必要があります。この例では、Mサイズが適切なサイズです。



- 3** 黒い先端が鼻の折り目線より上にある場合は、おそらくSサイズです。鼻の折り目線を下回っている場合は、Lサイズの可能性があります。確認するには、他のサイズガイドを切り取り、手順1と2をもう一度実行します。

これはあくまでも目安です。鼻の外形は、必ずしも内部の解剖学的構造を表すものではありません。怪我による顕著なずれや内部瘢痕組織は、ガイドに示されているサイズを完全に挿入できない場合があります。場合によっては1つ小さいサイズを選択する必要がある場合があります。

サイズがわかったら、該当サイズのTURBINEを購入してください。

※右の線が印刷後に37mm(1.46インチ)になっていれば適切です ⇒

